
1) Reinigung von Instrumenten von Temp Bond / AH-26

Hinweis: Nicht geeignet für Instrumente, die aus PET [Polyethylenterephthalat] bestehen.

Anwendung

1. Verunreinigte Instrumente in Ultraschallbad-Gerät legen
 2. Temp-Off™ (unverdünnt) einfüllen bis Instrumente bedeckt sind
 3. Ultraschallbad durchführen, Dauer: ca. 20 bis 30 Minuten
 4. Gereinigte Instrumente mit geeigneten Handschuhen entnehmen
-

2) Reinigung von Restaurationen / Provisorien

Wirkung

Temp-Off löst eine 0,25mm dicke gleichmäßige Schicht des alten Zements, um Raum für die neue Anwendung zu schaffen. Es löst Zinkoxid-basierte temporäre Zemente mit/ohne Eugenol.

Bei dieser Anwendung wird kein Ultraschallbad benötigt.

Anwendung

1. Restauration von den Zähnen entfernen, kurz unter Leitungswasser abspülen.
 2. Restauration in kleines Gefäß legen, Temp-Off dazugeben (vollständig bedecken).
 3. Temp-Off 10 Minuten einwirken lassen.
 4. Provisorium mit Pinzette entnehmen, kurz unter Leitungswasser abspülen.
 5. Verbliebenen Zement für 3 bis 5 Sekunden mit Dreifunktionsspritze entfernen.
 6. Nach dem Abspülen sieht man kleine "Inseln" des alten Klebers. Das bedeutet, die Zement-Dicke betrug an der Stelle mehr als 0,25mm. Es ist nicht notwendig, diese „Inseln“ zu entfernen, da sie als Unterfütterung dienen.
 7. Die Restauration kann nun wiederverwendet werden.
-

Warnung: Instrumente / Provisorien mit der Dreifunktionsspritze so absprühen, dass keine Spritzer in die Augen gelangen können. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt (www.temp-off.com).

Hinweise: Kühl und dunkel lagern. Nur für die äußerliche Anwendung bestimmt!

Inhaltsstoffe: Dest. Wasser, Kaliumhydroxid, Ethanolamin, Triton x-100

Weitere Informationen + das MSDS finden Sie im Internet unter www.temp-off.com

Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz

ORALIA medical GmbH
Schneckenburgstraße 11
78467 Konstanz
Deutschland
Tel.: +49 7531 28403-0
Fax: +49 7531 28403-10

Hersteller

Temp-Off Dental Ltd.
Dubnov 13 st. Tel Aviv 64368 Israel
office@tempoff-dental.com

EU-Repräsentant
MEDES LIMITED England
Tel.: +44 1923859810

1) Reinigung hartnäckiger Verunreinigungen an Instrumenten

Stark anhaftende Verunreinigungen an Instrumenten und in deren Vertiefungen (z. B. an Pinzetten) durch **Temp Bond** oder **AH-26** können im Ultraschallbad mit Temp-Off™ gereinigt werden. Einfach die Instrumente mit Temp-Off™ (unverdünnt) für 20-30 Minuten im Ultraschallbad behandeln. Fertig!

Hinweis: Nicht geeignet für Instrumente, die aus PET [Polyethylenterephthalat] bestehen.

2) Einfaches und zeitsparendes Lösen von temporärem Zement

Das patentierte Lösemittel entfernt eine homogene, 0,25mm dicke Schicht des alten Zements (zinkoxid-basierter, temporärer Zement, mit oder ohne Eugenol), um Platz zu schaffen für das Rezementieren / Wiedereinsetzen. Kronen werden von der Flüssigkeit chemisch nicht angegriffen.

Nach 10 Minuten wird das Provisorium aus der Flüssigkeit herausgenommen und mit einer Dreifunktionsspritze abgespritzt. Die Krone/Brücke kann sofort wieder beim Patienten eingesetzt und geklebt werden.

Während die Kronen in der Flüssigkeit baden, nutzen Sie die Zeit um andere Arbeiten zu erledigen – das zeitintensive **Abkratzen des Zementes entfällt**.

Beschädigungen, Bruch und Perforation der Kronen gehören der Vergangenheit an. Nadeleinstiche beim Abtragen des alten Zementes werden vermieden – das Personal bleibt verletzungsfrei.



Weitere Informationen und Videos im Internet unter www.temp-off.com

Bestellen Sie per Fax an +49 7531 28403-10

	Einzelpreis	Anzahl
Temp-Off™ (Art.-Nr. 66000010) Flasche, 275ml	24,90 €	_____

Aktion: 15% Rabatt auf den Rechnungsbetrag bei Erstbestellung

ORALIA medical GmbH
Schneckenburgstraße 11
78467 Konstanz
Deutschland

Tel.: 07531/28403-0

Hiermit bestelle ich verbindlich. Preise zzgl. Versand
[Deutschland 7,50 Euro, Österreich/Schweiz 25 Euro]
und gesetzlicher MwSt.

Praxisname/Kd.Nr./Stempel

Datum, Unterschrift